
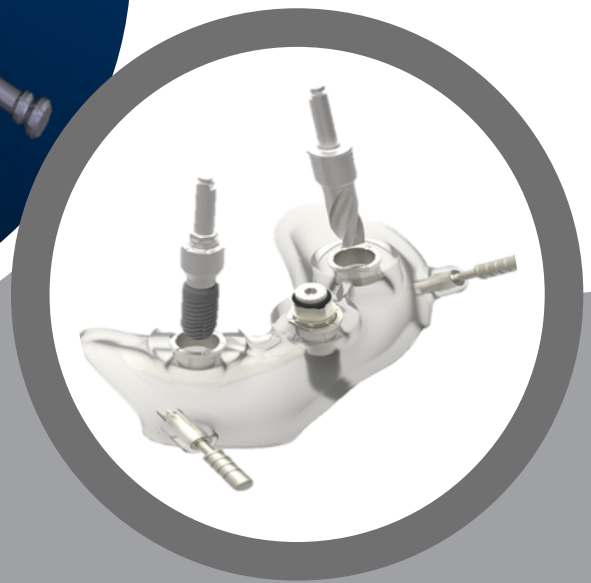



ImplantGuia

“Implantología guiada 3D a su medida”

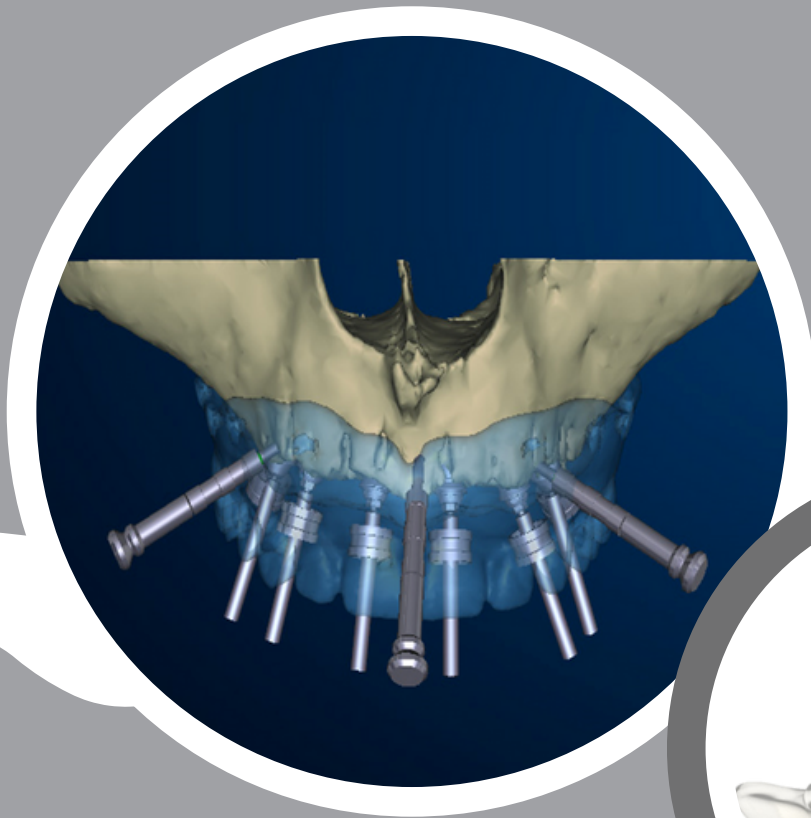

Tecnología 3D y expertos a tu servicio para una cirugía guiada precisa, accesible y personalizada con carga inmediata

CIRUGIA DE IMPLANTES CON FERULA GUIADA + CARGA INMEDIATA (Técnica Exclusiva)

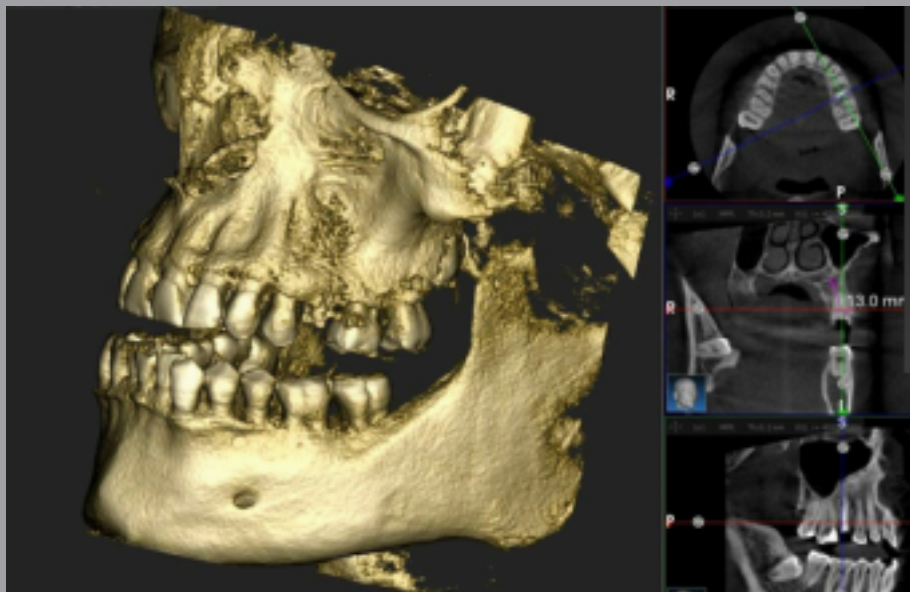

Elaboradas por impresión 3D estas férulas llevan incorporadas unas anillas guía y unos pines de fijación, que facilitan la colocación de los implantes en las posiciones que previamente han sido planificadas por un software de planificación quirúrgica, este posicionamiento guiado permite una mejor osteointegración y facilita la posibilidad de la colocación de una prótesis provisional.

1


Planificación a tu medida

2


Técnica precisa y Universal

3

Resultados óptimos y asegurados

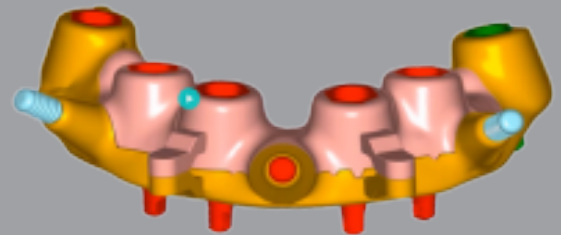

ImplantGuia

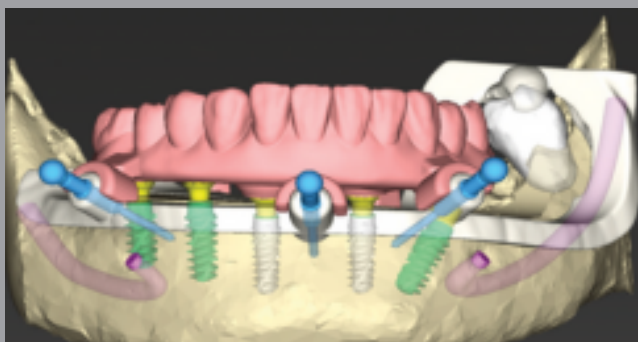

ImplanGuia es un sistema exclusivo, testado y universal para cirugía de Férula Guiada con todas las marca de implantes, pudiendo obtener prótesis inmediatas y realizar un tratamiento Premium, a través de un plan pilotado por expertos.

- **Mayor precisión, menor tiempo quirúrgico, reducción de complicaciones.**
- **Tratamiento mínimamente invasivo, recuperación más rápida.**
- **Valor añadido a tus tratamientos.**

PROCEDIMIENTO VALORACIÓN PACIENTE

1 Valoración Odontológica para ImplantGuia

- Expectativas estéticas y funcionales del paciente.
- Número de piezas a reemplazar.
- Limitaciones económicas y temporales.
- Hábitos (tabaco, alcohol, bruxismo, higiene oral).
- Tratamientos médicos o quirúrgicos previos.
- Evaluación odontológica.
- Estado periodontal



2 Planificación Clínicas


- Alta del paciente en la plataforma Tac dental (CBCT)
- Modelo o Escáner 3D del paciente, fotos del paciente
- Indicaciones de tratamiento
- Tiempo a manejar
- Tipos de Implante (marca y modelo) a utilizar

3 Presentación Proyecto ImplantGuia

- Tras toda la información recogida y una conversación con nuestros Cirujanos, nuestro equipo le mandara un proyecto para que valore modificaciones o aceptación

4 Entrega de ImplantGuia tras aceptación

1. Planificación de cirugía con nuestra caja quirúrgica, secuencia de fresados, topes a utilizar y tipo de anillas
2. Férula Guía para Cirugía de implantes
3. Pines de retención para pacientes edéntulos
4. Prótesis inmediata (si es solicitada)
5. Si los implantes no llegan a coger el torque indicado, el proyecto incluye Prótesis Completa por defecto (Si se ha solicitado carga inmediata y es rehabilitación completa) o férula transparente con piezas en las zonas ausentes.

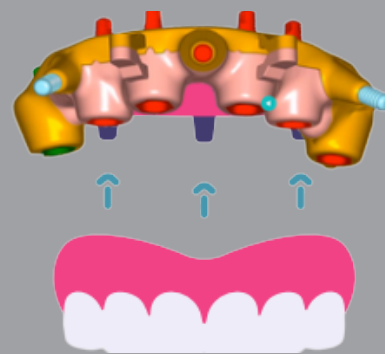

5 Intervención Paciente con ImplantGuia

- Comprobar que no falte nada en la caja de ImplantGuia Realizar todos los pasos indicados sin saltar ninguno, realizar intervención.
- Colocar los aditamentos protésicos y prótesis provisional.
- Tratamiento de mucho valor con visualización inmediata para el paciente, y cirugía de intervención planificada sin errores.

QUE SE NECESITA PARA IMPLANTGUIA

1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tras las explicaciones de nuestro funcionamiento y protocolos la aceptación por parte de clínica de nuestra metodología exclusiva para los tratamientos de implantología de cirugía guiada con carga inmediata.



2

ALTA EN PLATAFORMA

Le daremos de alta en nuestra plataforma para prescribir el proyecto y recibir indicaciones.



3

FORMACION

Tendrá que realizar un curso formativo presencial en el que verá la metodología, protocolos y practicas en pacientes, obteniendo la Certificación de ImplantGuia



4

CAJA QUIRURGICA

Tendrá que adquirir nuestra caja quirúrgica que dispone de fresas, topes y anillas para realizar las cirugías con cualquier marca de implante



WORKFLOW

Base de la Odontología Digital

Requisitos para la planificación digital

Para diseñar una férula quirúrgica precisa, se requiere la recopilación de información detallada del paciente mediante estudios de imagen y registros digitales.

1 Estudios radiográficos: CBCT o TAC

El escaneo tomográfico es esencial para evaluar la calidad ósea, la anatomía del paciente y planificar la colocación de los implantes.

Requisitos del CBCT o TAC:

- Imágenes con buena resolución y sin distorsión.
- Campo de visión que abarque la zona maxilar y mandibular según el caso.
- Paciente con mordida en máxima intercuspidad para evitar alteraciones en la posición mandibular.

Para pacientes edéntulos:




- Se recomienda realizar dos tomografías (CBCT o TAC):
 1. Sin prótesis dental → Para evaluar el volumen óseo real.
 2. Con la prótesis dental colocada → Para mejorar la referencia de las dimensiones verticales y la oclusión.
- En caso de realizar el estudio con la prótesis, se debe agregar marcadores radiopacos a la prótesis para facilitar la planificación digital.

2 Escaneo de arcadas superior e inferior completas

- Escaneo de la relación oclusal en máxima intercuspidad.
- En pacientes parcialmente edéntulos, se debe capturar la zona desdentada con suficiente margen de tejido blando y estructuras anatómicas.

Para pacientes edéntulos:

Si se dispone de una prótesis bien ajustada, se recomienda escanearla por dentro y por fuera para usarla como referencia en la planificación.

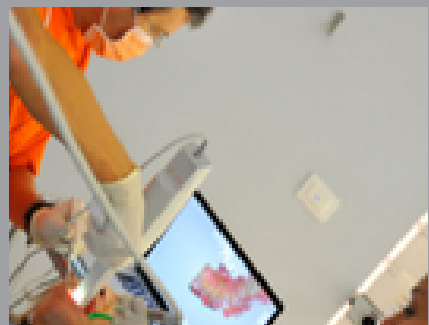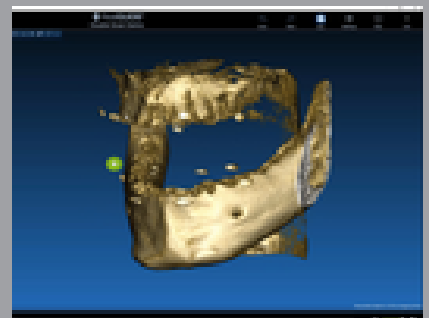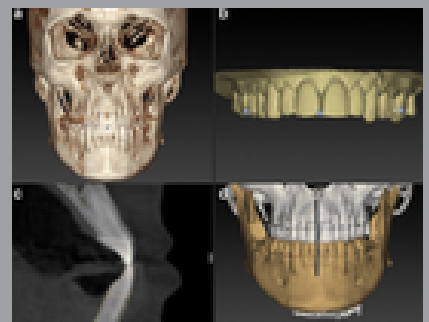

WORKFLOW

Base de la Odontología Digital

3


Fotografías del paciente

Las imágenes fotográficas permiten evaluar la estética y la relación de los tejidos blandos con la estructura ósea y dental.

Tipos de fotografías requeridas:

1. Frontal en reposo (con labios en posición natural).
2. Frontal sonriendo (para evaluar la línea de la sonrisa).
3. Perfil izquierdo y derecho (para valorar la armonía facial).
4. Intraorales:
 - Vista frontal con separadores.
 - Vistas laterales derecha e izquierda.
 - Vista oclusal superior e inferior.



* Fotografías con la prótesis puesta (para evaluar su estética y funcionalidad).

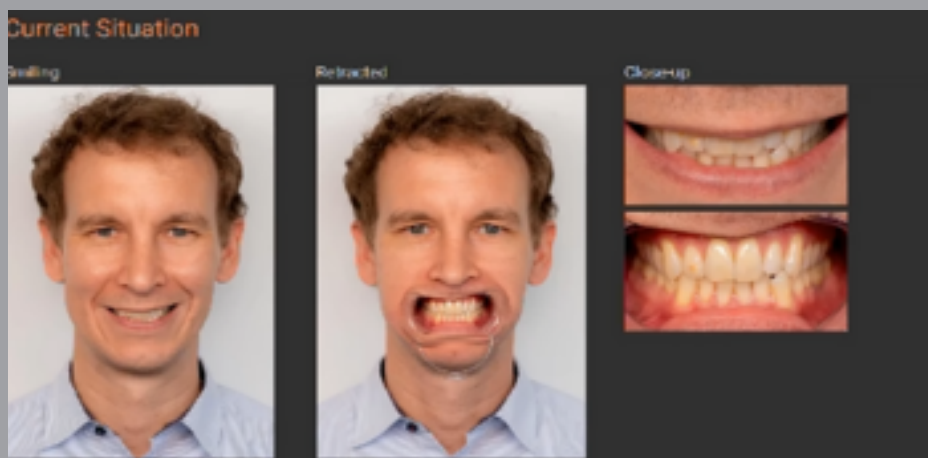

Planificación

kit ImplantGuia:

1. Planificación digital con pautas específicas.
2. Férula impresa 3D.
3. Anillas de control. Caja Quirúrgica específica con topes y transportadores.
4. Prótesis provisional o Corona Provisional segun caso con ALTA ESTETICA

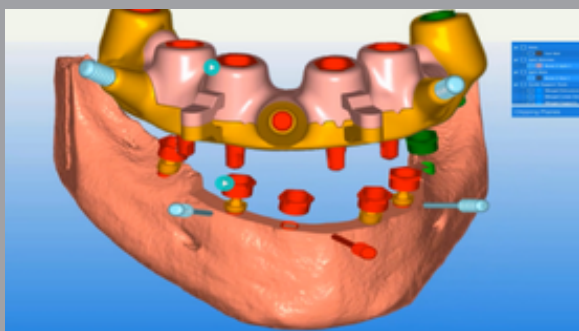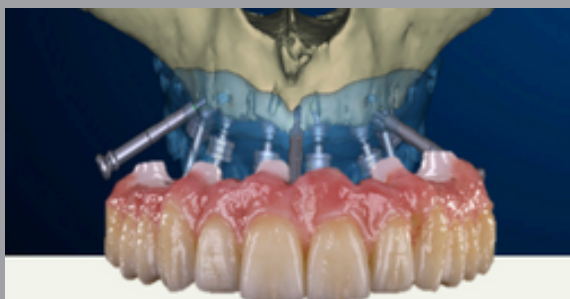

*** Podrás utilizar tu marca de aditamentos o Dentro de nuestro marco de acuerdos nacionales e internacionales ,aprovecharte de condiciones especiales con diferentes casas comerciales de Implantes y aditamentos. (Consulta condiciones)**

Prótesis Definitiva:

Nuestro equipo podrá informarte de técnicas y materiales para la confección de la prótesis requerida por tu paciente, utilizando nuestro centro de fresado + diseño con la finalidad de un control total, una estética de vanguardia a un tratamiento Premium personalizado.

